



Lohmann & Rauscher

Suprasorb® C

Apósito de colágeno

Acelera activamente la curación de las heridas.



Suprasorb C es una esponja de colágeno nativa absorbible que acelera la curación de manera activa. Su colágeno puro, de poros abiertos permite el tratamiento de heridas, de manera natural, con un efecto completo: Suprasorb C forma un gel cuando entra en contacto con el exudado de la herida, absorbiendo de forma rápida y efectiva los factores que inhiben la curación de la herida, por ejemplo, el exudado de la misma. Suprasorb C también proporciona hemostasia física en la herida.


En cada fase del proceso de curación de la herida Suprasorb C brinda equilibrio a la herida. Se une a los factores que inhiben la curación de heridas, tales como proteasas, radicales y citoquinas, y protege los factores de crecimiento que promueven la curación de las heridas. Esto estimula la migración de fibroblastos para la formación de tejido de granulación y promueve la regeneración de las células epidérmicas.

El efecto de 3 fases de Suprasorb C proporciona un tratamiento confiable: en la fase de exudación mediante la limpieza de la herida y optimizando el entorno de la herida, en la fase de granulación mediante la estimulación de tejido de granulación y en la fase de epitelización acelerando la reepitelización.

Intervalo de cambio de apósitos

El intervalo de cambio de apósitos lo determina el médico tratante basándose en la condición de la herida, el nivel de exudado y el apósito secundario, después de 5 a 7 días* como máximo.

* Se recomienda humedecer ligeramente el Suprasorb C con solución salina fisiológica o solución de Ringer para las heridas con exudado leve con cambio diario.

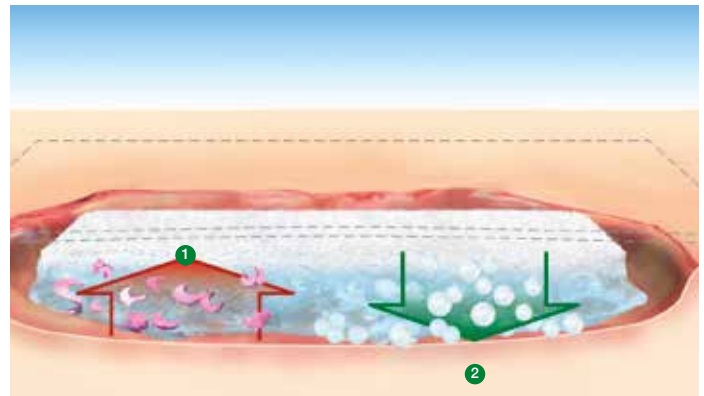

- 1 rápida absorción de exudado y formación de gel; los factores que inhiben la curación de las heridas se fijan al apósito.
- 2 el colágeno liberado activa la curación de las heridas y protege los factores de crecimiento.

Información para pedidos

Suprasorb® C

Apósito de colágeno para heridas

Tamaño (cm)	REF	Unidades de envío (piezas)	Peso en kg (SC/TC)
estéril, empaque individual			
4 x 6 x 0.8	20481	5/225	0.04/1.96
6 x 8 x 0.8	20482	5/180	0.07/2.46
8 x 12 x 0.8	20483	5/90	0.11/2.01

Campos de aplicación

- apósito para heridas con lesiones con daño tisular extenso superficial, por ejemplo,
 - ◆ quemaduras
 - ◆ daño tisular quirúrgico
 - ◆ úlceras de varios orígenes y heridas en cavidades, en particular cuando se encuentran condiciones de estancamiento de la herida después del tratamiento con otros apósitos para heridas

Propiedades

- acelera activamente la curación de las heridas
- fija los factores que impiden la curación de las heridas (por ejemplo, proteasas, radicales, citoquinas)
- protege los factores de crecimiento
- rápida absorción del exudado a través de su distintiva estructura porosa

Combinaciones recomendadas

- Suprasorb X
- Suprasorb P
- Suprasorb P silicone
- Suprasorb H
- Suprasorb F
- Suprasorb G Amorphous Gel
- Vliwasorb
- Vliwazell
- terapia de compresión
- vendas elásticas

Observaciones

- se recomienda humedecer el Suprasorb C con solución salina fisiológica o solución de Ringer para las heridas con exudado leve



Lohmann & Rauscher