

Suprasorb® G

Apósito de gel

Proporciona humedad e incrementa la autólisis.



Gracias a la suave fuerza del hidrogel, Suprasorb G elimina los detritos y el tejido necrótico de la profundidad del lecho de la herida para heridas con exudación leve y heridas secas. El gel elimina suavemente el tejido necrótico y restos de tejido necrótico. De esta forma, Suprasorb G acelera el proceso autolítico. Para el cuidado avanzado de heridas, Suprasorb G se utiliza como un apósito de gel para heridas superficiales y como gel amorfo para heridas profundas. Ambas versiones tienen la capacidad de suministrar humedad y aliviar del dolor. Su consistencia orientada al usuario y su jeringa de aplicación única hacen más fácil la aplicación para médicos y enfermeras.

Intervalo de cambio de apósitos

Suprasorb G apósito de gel


- cuando se agota la reserva de humedad (aparece una ligera opacidad), después de 5 a 7 días, como máximo

Suprasorb G, Gel Amorfo

- depende del apósito secundario, después de 3 días como máximo

Versiones

- apósito de gel
- gel amorfo

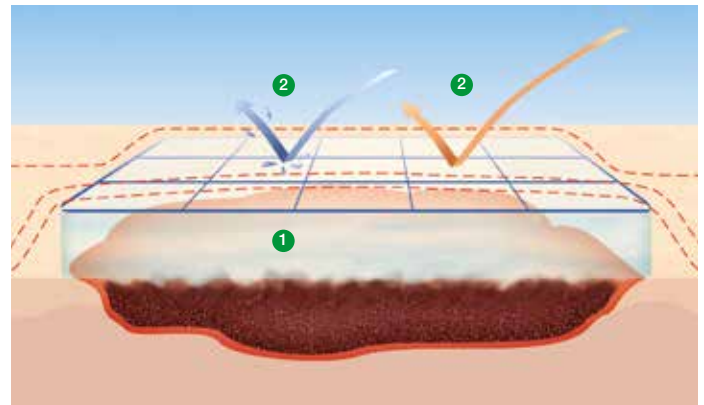

- 1 La capa de hidrogel elimina suavemente el tejido necrótico seco.
- 2 La película de poliuretano repele las bacterias y los fluidos (apósito en gel).

Información para pedidos

Suprasorb® G

Gel Amorfo

Tamaño (g, jeringa)	REF	Unidades de envío (piezas)	Peso en kg (SC/TC)
estéril, en jeringa de aplicación			
6	20478	10/500	0.23/12.20
20	20479	10/240	0.28/7.10

Suprasorb® G

Apósito en gel

Tamaño (cm)	REF	Unidades de envío (piezas)	Peso en kg (SC/TC)
estéril, sellado de forma individual			
5 x 7.5	20470	5/25	0.12/0.60
10 x 10	20471	5/25	0.21/1.10
20 x 20	20472	5/25	0.48/2.50

Campos de aplicación

- heridas necróticas y con exudado leve
- heridas superficiales (apósito) y profundas (gel amorfo)
- heridas no infectadas
- en todas las fases de la curación de las heridas, por ejemplo:
 - ◆ úlceras de varios orígenes
 - ◆ quemaduras de 2º grado
 - ◆ heridas posoperatorias

Propiedades

- elimina el tejido necrótico preservando la piel perilesional
- suministra humedad
- fácil de usar gracias a su jeringa de aplicación (gel amorfo)
- muy buen monitoreo de la herida debido a la película transparente (apósito en gel)

Recommended combinations

- Suprasorb C
- Suprasorb H
- Suprasorb F
- terapia de compresión
- vendas elásticas

Observaciones

- puede aplicarse más allá del borde de la herida
- si es necesario, puede recortarse para adaptarlo a la zona de la herida



Lohmann & Rauscher