



Lohmann & Rauscher

Suprasorb[®] H Apósito hidrocoloide

Delgado y flexible para un ambiente ideal para la curación de la herida.



Suprasorb H crea un entorno húmedo ideal en la herida para heridas con exudado leve a moderado, promoviendo la cicatrización de las heridas de forma confiable.


Una capa absorbente de hidrocoloide aplicada a la película de poliuretano que se expande al entrar en contacto con la herida para formar un gel que se une a los residuos de tejido y exudado. Esta formación de gel permite que el apósito se amolde a la estructura de la herida. Todas las versiones de Suprasorb H son especialmente delgadas y flexibles. Es simple y seguro de usar debido a sus excelentes propiedades adhesivas. Debido a que el apósito repele tanto a las bacterias como a los líquidos, los pacientes pueden lavarse y ducharse fácilmente. Suprasorb H delgado está disponible en un tamaño de 5 x 5 cm específicamente para el tratamiento del pie diabético.

Intervalo de cambio de apósitos

El intervalo de cambio de apósitos lo determina el médico tratante basándose en la condición de la herida, el grado de exudación y el posible apósito primario, después de 5 a 7 días como máximo. El apósito debe cambiarse si hay formación severa de ampollas que se extiende más allá de la superficie de la herida.

Versiones

- estándar
- delgado
- sacro
- borde

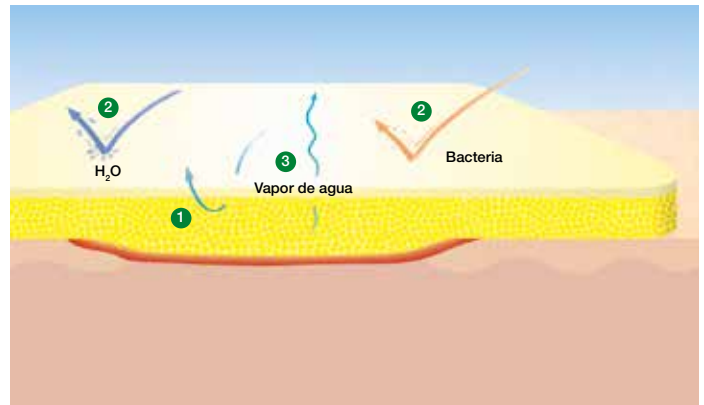

- 1 El hidrocoloide se expande cuando se absorbe el exudado, formando un gel que se une a los restos de tejido y exudado.
- 2 repele bacterias y líquidos
- 3 El exceso de vapor de agua se evapora.

Información para pedidos

Suprasorb® H

Apósito hidrocoloide estéril, sellado de forma individual

Tamaño (cm)	REF	Unidades de envío (piezas)	Peso en kg (SC/TC)
estándar			
10 x 10	20403	10/660	0.16/10.88
15 x 15	20401	5/50	0.23/2.40
20 x 20	20402	5/50	0.36/3.80
delgado			
5 x 5	20424	10/1650	0.03/5.88
5 x 10	20410	10/480	0.07/3.40
5 x 20	20411	10/250	0.13/3.30
10 x 10	20412	10/720	0.12/8.71
15 x 15	20413	5/50	0.14/1.50
20 x 20	20414	5/50	0.23/2.40
sacro			
14 x 16	20430	5/200	0.21/8.80
borde			
14 x 14	20420	5/200	0.18/7.40

Campos de aplicación

- heridas con exudado moderado (Suprasorb H estándar, sacro, borde)
- heridas con exudado bajo (Suprasorb H delgado)
- heridas superficiales
- heridas no infectadas
- en todas las fases de la cicatrización de las heridas, por ejemplo.:
 - ◆ úlceras de varias etiologías
 - ◆ quemaduras de 2º grado
 - ◆ zonas donantes
 - ◆ heridas posoperatorias

Propiedades

- una muy buena cicatrización de las heridas mediante un buen manejo de los exudados
- muy cómodo porque el apósito es fácil de aplicar
- especialmente delgado y flexible
- repele bacterias y líquidos
- ducharse es posible

Combinaciones recomendadas

- Suprasorb Liquacel
- Suprasorb A
- Suprasorb C
- Suprasorb G, gel amorfo
- terapia de compresión

Observaciones

- Suprasorb H delgado está disponible en un tamaño de 5 x 5 cm específicamente para el tratamiento del pie diabético.



Lohmann & Rauscher