



Lohmann & Rauscher

Suprasorb® X + PHMB Apósito para heridas HydroBalance antimicrobiano

Regula la humedad en las heridas y reduce
los microorganismos.



Suprasorb X + PHMB es, el apósito antimicrobiano con regulación de la humedad indicado para heridas con exudado leve a moderado que estén infectadas o en riesgo de infección. Además de las propiedades y ventajas de Suprasorb X con fibras HydroBalance biosintéticas, Suprasorb X + PHMB también contiene un agente antimicrobiano comprobado: Polihexametileno de Biguanida (PHMB) al 0,3%. PHMB libera su amplio espectro antimicrobiano tanto en el apósito como en la superficie de la herida, eliminando efectivamente bacterias, hongos y levaduras.

Incluso heridas con infección clínica manifiesta Suprasorb X + PHMB es muy seguro para el personal médico y es bien tolerado por los pacientes. Este apósito también es eficaz frente a *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM) y *Enterococcus faecium* resistente a la vancomicina (ERV). Para el cuidado húmedo de heridas, al elegir un apósito secundario adecuado (por ejemplo Suprasorb F*) asegúrese que Suprasorb X + PHMB permanezca húmedo en el lecho de la herida.

Intervalo de cambio del apósito


El intervalo de cambio del apósito, lo determina el médico tratante con base en la condición de la herida, el estado de infección, el nivel de exudado y el apósito secundario*, como máximo 5 a 7 días**.

* Algunos consejos sobre las heridas infectadas: use un apósito secundario oclusivo solo si el médico así lo decide basándose en la situación general.

** Algunos consejos sobre las heridas infectadas: El apósito deberá cambiarse a diario.

Versiones

- apósito
- tira

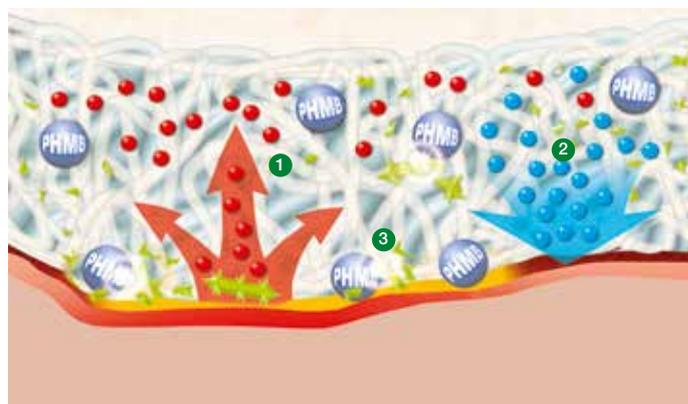

- 1 El apósito absorbe el exceso de exudado de la herida.
- 2 La humedad del apósito se libera en el área de la herida cuando son heridas con exudado leve.
- 3 El polihexametileno de biguanida (PHMB) liberado elimina los microorganismos.



- 1 Limpie la herida conforme a la normativa habitual y luego seque cuidadosamente el área alrededor de la herida con almohadillas estériles para heridas.
- 2 Aplique el Suprasorb X + PHMB y adapte la tira a la herida. Si se utiliza tira, dóblela varias veces y sin hacer presión en la herida.
- 3 Dependiendo nivel de exudado, asegúrela con un apósito secundario apropiado: para heridas no infectadas Suprasorb X con, por ejemplo, Suprasorb F*, Suprasorb P*.

Ordering information

Suprasorb® X + PHMB

Apósito para heridas HydroBalance antimicrobiano, estéril, con empaque individual

Tamaño (cm)	REF	Unidades de envío (piezas)	Peso en kg (SC/TC)
Apósito			
5 x 5	20540	5/90	0.07/1.32
9 x 9	20541	5/80	0.11/1.85
14 x 20	20542	5/65	0.30/4.02
Compresa			
2 x 21	20543	5/130	0.08/2.07

Campos de aplicación

- heridas con exudado leve a moderado
- heridas superficiales o profundas
- heridas infectadas
- en todas las fases de la curación de las heridas, por ejemplo:
 - ◆ úlceras de varios orígenes
 - ◆ quemaduras de 2º grado
 - ◆ zonas donantes
 - ◆ heridas posoperatorias
 - ◆ abrasiones, laceraciones

Propiedades

- rápida eficacia antimicrobiana de amplio espectro, incluyendo frente a SARM y ERV
- disminución del dolor fármaco adicional
- curación de la herida mediante el efecto único HydroBalance (regulación de la humedad)
- gran comodidad debido a su estructura suave y flexible

Combinaciones recomendadas

- Suprasorb P
- Suprasorb F
- Solvaline N
- Lomatuell H
- terapia de compresión
- vendas elásticas

Observaciones

- radiolúcido
- Algunos consejos sobre heridas infectadas: use un apósito secundario oclusivo solo si el médico así lo decide basándose en la situación general.



Lohmann & Rauscher